

LFMトレーナー

Loop Forming Method trainer

取扱説明書


※本製品ご使用の際は、練習用内視鏡をご使用ください

LFMトレーナー


同梱品

本体・キャリングケース・使用方法DVD・取扱説明書

本体構成

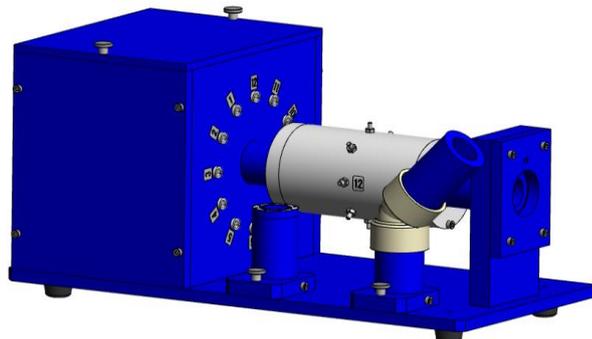


収納時

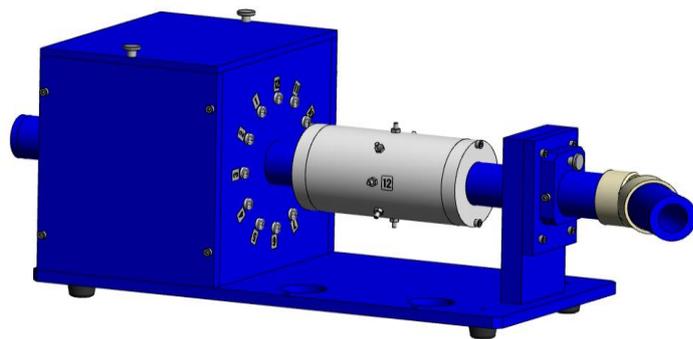

使用時

各部名称

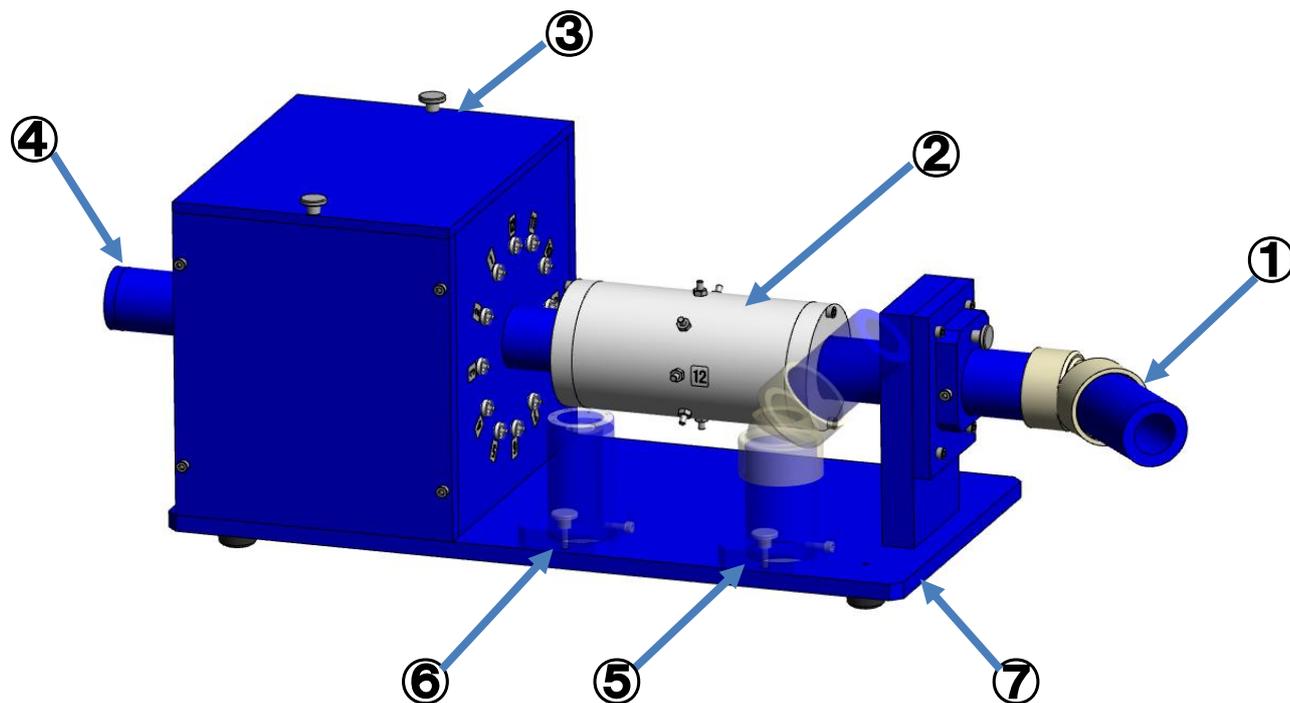


- ①内視鏡挿入口
- ②食道ESD部
- ③反転生検部
- ④EIS練習部

- ⑤挿入口収納位置
- ⑥EIS練習部収納位置
- ⑦ベース

LFMトレーナー

組立方法

- ①挿入口をベースから取り外し本体へ取り付ける
- ②EIS練習部をベースから取り外し本体へ取り付ける

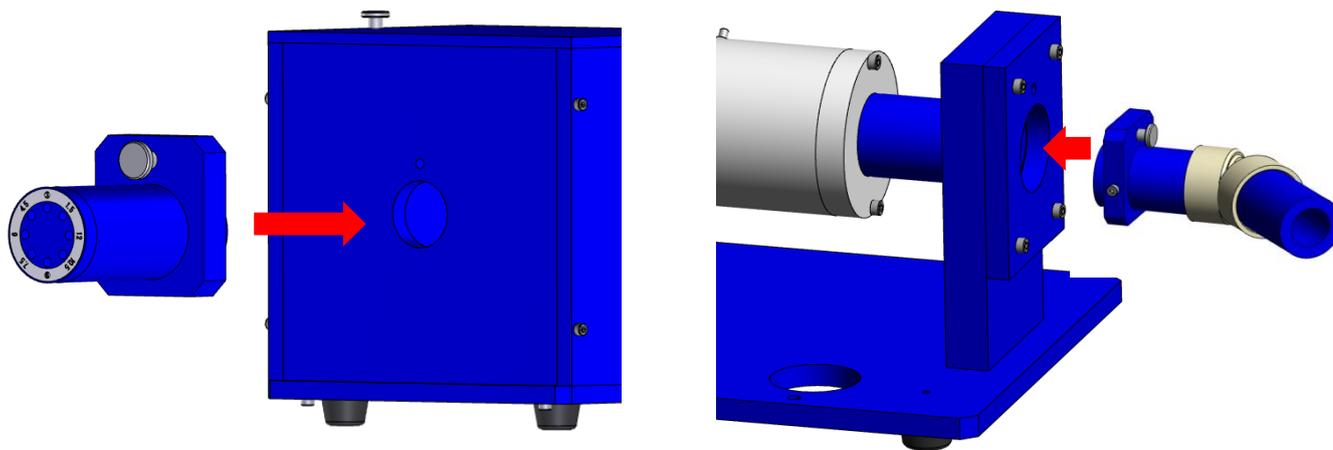


つまみを回しネジ止め

- ③収納時は各部を取り外しベースに取付ける

食道ESD部



回転カラーを処置具で押し回す

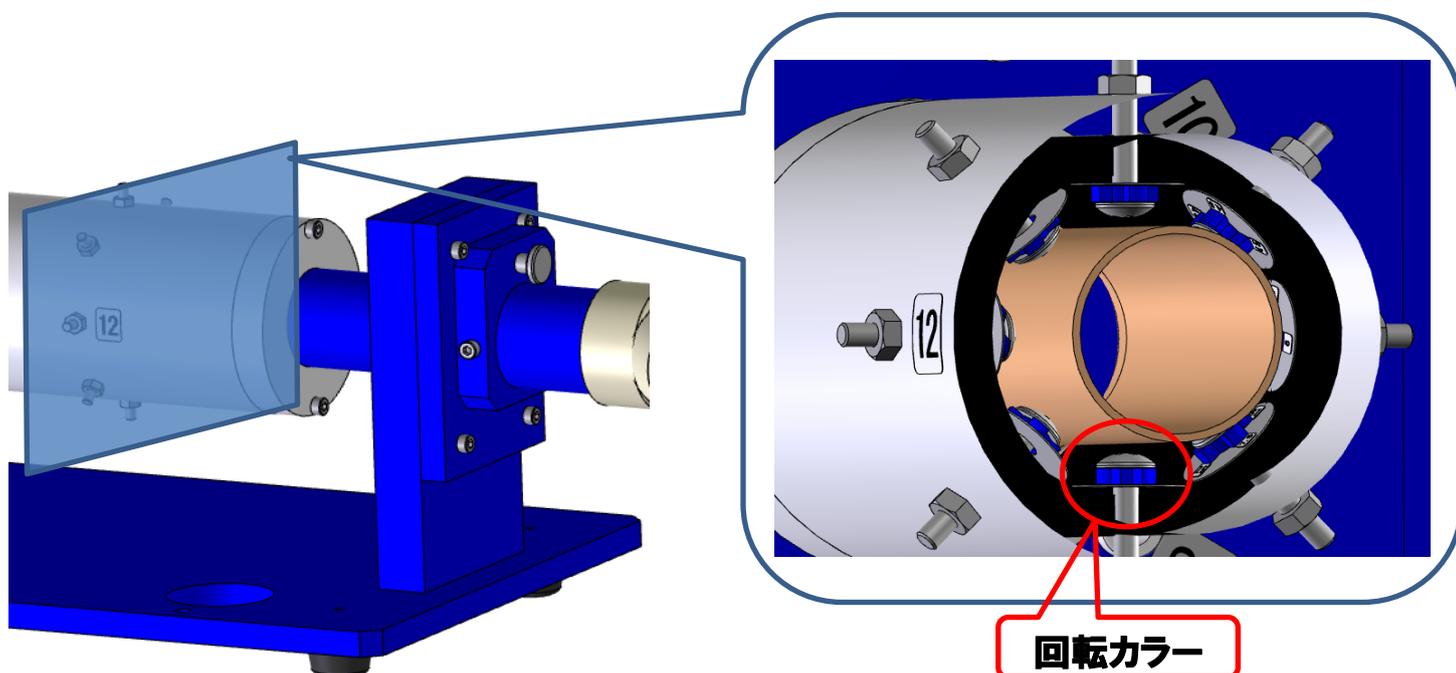

LFMトレーナー



反転生検部

- ① 鉗子を穴に差し込む
- ② 終了後は外側からピンを押し戻す

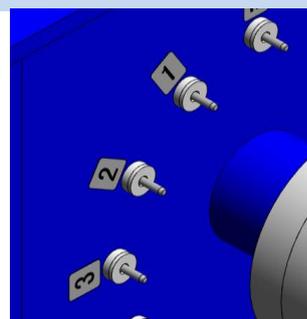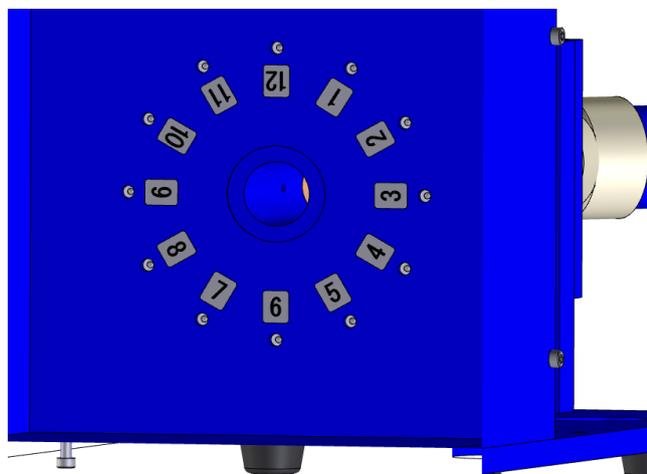

EIS練習部

- ① 鉗子で白線を隠しながら穴に突きさす

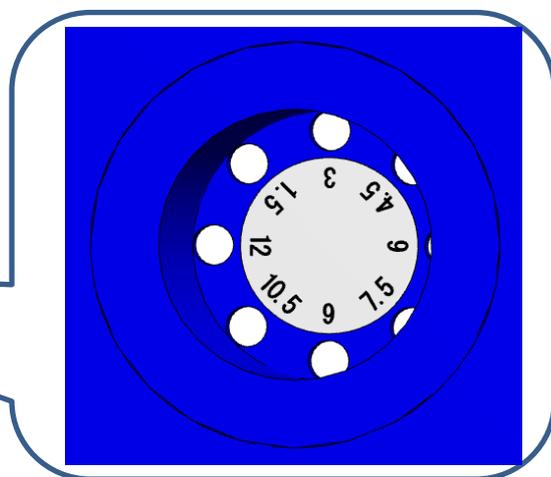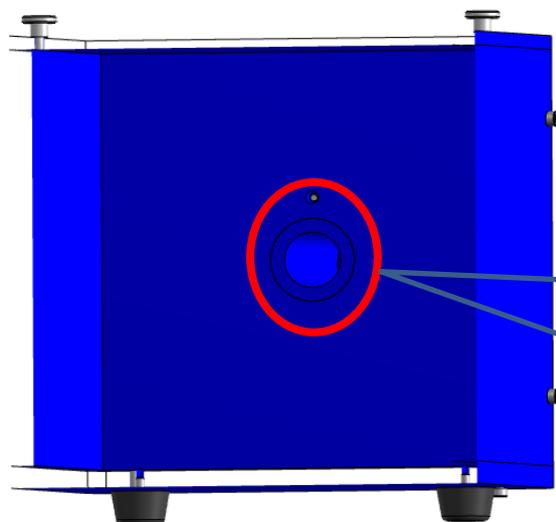

製造：野村ユニソン株式会社
長野県茅野市ちの650番地



販売：野村ユニソン株式会社
メディカルデバイス部

Tel: 0266-78-7371

E-Mail: NomuraMedicalDevice@nomura-g.co.jp

<http://www.nomura-g.co.jp/>

監修：信州大学医学部附属病院
内視鏡センター

長野県松本市旭 3-1-1

TEL: 0263 - 37 - 2634

sugatomo@shinshu-u.ac.jp

